



DatamedWL™

Gebruiksaanwijzing

Datamed LLC

DatamedWL™ v3

Doc ID DMD-10500-01000-NL Rev A

4/2017

COPYRIGHT

Copyright © Datamed LLC. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

GARANTIE

Datamed LLC ("DLLC") geeft geen garantie van welke aard dan ook ten aanzien van dit materiaal inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties of verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De hierin beschreven software valt onder de standard EULA van DLLC die beschikbaar is op de website van DLLC op (www.datamed.com).

WAARSCHUWINGEN

Dit product is niet bedoeld voor thuisgebruik.

HANDELSMERKEN

De volgende merken zijn de geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

<i>Eigenaar</i>	<i>Handelsmerk(en)</i>
Datamed LLC	<i>Datamed</i>
Digi International, Inc.	<i>AnywhereUSB</i>
Microsoft Corporation	<i>Microsoft and Microsoft Windows Server</i>
VMWare, Inc.	<i>VMWare and vMotion</i>

REGELGEVING

Dit product voldoet aan de eisen van de toezichthouder van Europese Richtlijn 93/42/EEC.



Vervaardigd en gedistribueerd door:

Datamed LLC
9620 Mitchell Place
Brentwood, TN 37027
USA
US: +1 800 601-3361
Int'l: +1 901 672 6225
Fax: +1 901 672 6331
www.datamed.com

Beoogd gebruik

Dit product is middleware en bevindt zich tussen een APPARAAT (een apparaat voor het verkrijgen van ECG dat om orders zal vragen) en een SYSTEEM (een systeem dat de ECG-orders bevat). Het primaire doel is om een naadloze conversiegeleider te zijn tussen deze twee en om er voor te zorgen dat het APPARAAT een systeemeigen query aan het SYSTEEM kan verzenden en om een lijst met orders terug te krijgen. Vanuit het perspectief van het APPARAAT imiteert het een SYSTEEM van dezelfde fabrikant; vanuit het perspectief van het SYSTEEM imiteert het een APPARAAT van dezelfde fabrikant. Het secundaire doel is om als ontvanger te fungeren en om (eventueel) een zender te zijn voor de eenzijdige ECG-transmissie vanaf het APPARAAT naar het SYSTEEM gebruikmakende van DatamedFT™ voor de conversie. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hier worden beschreven.

Systeemeisen

- **Computer.** Als de software niet geïnstalleerd is op de server van het ECG-managementsysteem zal deze op een afzonderlijk aangrenzend systeem worden geïnstalleerd. De minimale specificaties voor deze computer zijn: 2 GB RAM, 40 GB HD, 1 USB-poort voor de licentiesleutel (tenzij gebruik wordt gemaakt van een USB-naar-LAN-adapter), en een LAN-verbinding voor gegevensoverdracht. De volgende besturingssystemen worden ondersteund: Windows Server 2008 x86 en x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, en Windows Server 2016. Deze applicatie vereist Microsoft .NET 4.5 Framework.
- **Overwegingen voor VM.** Deze software kan op een virtuele machine worden uitgevoerd maar er moet rekening worden gehouden met toegang tot de USB-licentiesleutel. Voor installaties op een enkele machine kan de sleutel in de hostcomputer worden geplaatst waarna deze aan de VM kan worden toegewezen. Voor fouttolerante configuraties waaronder vMotion® kan een USB-naar-LAN-adapter zoals AnywhereUSB worden gebruikt.

Installatie

- Installeer de geleverde licentiesleutel op de computer. Deze dient te worden geplaatst in de USB-poort van de fysieke computer (of de USB-naar-LAN-adapter). Drivers kunnen hier worden gedownload: <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/>.
- Voer het geleverde installatieprogramma uit en volg de stapsgewijze aanwijzingen op.

- Voer het configuratieprogramma na de installatie uit om de applicatie te configureren. Voor dit programma is er een koppeling op het bureaublad en op het menu Start.
- Na de configuratie kan het programma via het configuratieprogramma worden gestart of zal deze automatisch opstarten na het opnieuw opstarten van de computer.

Configuratie

Start het configuratieprogramma en stel zo nodig de configuratie-instellingen bij. De belangrijkste configuratie-items zijn de invoerindeling, uitvoerindeling, archivering en logboekregistratie. Indien alle instellingen juist zijn kunt u de instellingen opslaan door op de knop **Save** te drukken. Start de service vervolgens door op de knop **Start** te drukken of door gebruik te maken van de standaard applet voor Windows-services.

Specifieke details over de configuratie-instellingen kunnen worden gevonden in de Gebruikershandleiding voor deze applicatie die beschikbaar is op (www.datamed.com). De gebruikershandleiding is alleen in het Engels beschikbaar.

Werkwijze

De applicatie draait zonder toezicht als een Windows-service en er is geen interface of interactie nodig voor het gebruik.

Bijwerken van de licentiesleutel

Volg indien aanvullende licenties zijn aangeschaft de volgende stappen om de licentiesleutel bij te werken:

1. Start het configuratieprogramma en selecteer *License → Create License Update Request File (Licentie → Aanvraagbestand voor bijwerken licentie)* in het menu. Selecteer een map en bestandsnaam om het bestand naar toe te schrijven.
2. Een bestand zal op de opgegeven locatie worden gemaakt met de extensie **".c2v"**. E-mail dit bestand naar DLLC op support@datamed.com.
3. DLLC zal een bijwerkingsbestand aanmaken (met een extensie van **".v2c"**) en deze terug e-mailen. Sla dit bestand op.
4. Selecteer in het configuratieprogramma *License → Load License Update (Licentie → Licentie-bijwerking laden)* in het menu. Navigeer naar het opgeslagen bijwerkingsbestand en klik op **Open (Openen)** om de licentie te laden.

5. Wanneer het bijwerken is gelukt zal een bericht worden weergegeven waardoor u weet dat het is gelukt. De bestanden voor het bijwerken kunnen worden weggegooid. Stop de service en start deze opnieuw zodat de nieuwe licentie geldig is.

Technische ondersteuning

Ondersteuning van DLLC kan worden bereikt via support@datamed.com of via de telefoon op ofwel (800) 601-3361 Ext 2 (binnen de V.S.) of +1 901 672 6225 Ext 2 (buiten de V.S.).